

酒精棉片

INNOVATION
FOR SAFETY

2023-02-22

酒精棉片使用说明书



重要：使用之前请仔细阅读本说明书。

【产品名称】酒精棉片

【规格型号】30mm×36mm、30mm×50mm、30mm×60mm、120mm×180mm、140mm×190mm

【产品结构、性能】

酒精棉片由75%酒精溶液和卷棉（水刺法非织造布）组成，采用铝箔纸热封。

酒精棉片对金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、大肠杆菌的杀灭率符合GB/T 26373-2020的标准。

酒精棉片一次性使用。

【适用范围】用于注射、输液前对完整皮肤消毒。

【注意事项】

- 本产品不适合用于外伤或灼伤。如有发红、过敏、肿胀、疼痛或发炎症状，停止使用并向医生咨询。
- 如果酒精棉片包装破损，请勿使用。
- 酒精棉片仅供外用，不可用于眼睛或粘膜，一旦触及伤口，请咨询医生。
- 酒精棉片一次性使用，不得多人共用，使用时远离明火。
- 将酒精棉片放置于儿童不易接触的地方。
- 严禁超期使用。

【禁忌症】

1. 擦拭部位有皮肤感染或者皮肤破损者，请勿使用。
2. 对酒精过敏者，需谨慎或遵医嘱。

【使用方法】

1. 打开产品包装，取出酒精棉片
2. 用酒精棉片涂抹所需部位皮肤
3. 待酒精风干后，消毒完成
4. 将用过的酒精棉片丢弃在指定的废物桶中。

【符号解释】



不得二次使用



包装破损切勿使用

【运输、储存条件】

包装后的产品远离热源及高温物体，防止进水或曝晒，不得与污染物混合装运；应储存于干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中。

【注册人/售后服务单位/生产企业】苏州施莱医疗器械有限公司

【住所】苏州高新区普陀山路168号

【生产地址】苏州高新区普陀山路168号2号楼、3号楼

【电话】0512-65799308

【生产许可证号】苏药监械生产许20080044号

【注册证编号】苏械准20182140512

【产品技术要求】苏械准20182140512 酒精棉片

【生产日期】见标签

【使用期限】三年

【失效日期】见标签

【修订日期】2023年03月09日（07版）

● 客服电话 ●

400-018-8661

（请在工作时间内拨打，感谢您的配合）

www.sterilance.com